



Seringa/Medidor de Dilatação Viper®

Instruções de Uso
Ler atentamente antes de usar.

Atenção: A lei federal (dos EUA) restringe a venda ou o pedido deste dispositivo, que somente pode ser realizado por um médico.

Diversatek Healthcare

102 E. Keefe Ave.
Milwaukee, WI 53212 EUA
F 800.558.6408 | 414.265.7620

sales@diversatekhc.com

[DiversatekHealthcare.com](https://www.DiversatekHealthcare.com)

Seringa/Medidor de Dilatação Diversatek Healthcare Viper®
Instruções de Uso
Ler atentamente antes de usar.

USO PRETENDIDO

A Seringa/Medidor de Dilatação Viper® de uso único tem sua aplicação realizada em combinação com uma alça de inflação (não fornecida nesta embalagem), para assim realizar a inflação e a desinflação dos dilatadores de balão intragástrico, ao mesmo tempo em que monitora as pressões do dilatador de balão.

Número da Peça

1204-01

Descrição

Seringa/Medidor de Dilatação Viper®, Não Estéril

QUEM USARÁ ESSE PRODUTO

O uso deste dispositivo é restrito a um profissional de saúde treinado.

CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações incluem as descritas especificamente com relação à dilatação.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Seringa para uso em um único paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou levar à falha do dispositivo o qual, por sua vez, pode resultar em lesão, doenças ou óbito do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização também podem aumentar o risco de contaminação do dispositivo e/ou causar infecção ou infecção cruzada do paciente, incluindo, entre outros, a transmissão de doença(s) infecciosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a lesões, doenças ou óbito do paciente.

Não utilizar este dispositivo para qualquer finalidade diferente do uso pretendido.

Armazenar em local seco e protegido de temperaturas extremas.

INSTRUÇÕES DE USO











Montar e utilizar a Seringa/Medidor de Dilatação Viper de acordo com as instruções do fabricante da alça de inflação.

Este dispositivo é compatível com alças de inflação para seringas de 60 cc.

DESCARTE DO PRODUTO

Após o uso, este produto pode representar um risco biológico potencial. Descartar o produto e a embalagem do produto de acordo com a prática médica aceita e as leis e os regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS

	Fabricante
	Data de Validade (DD-MM-AAAA)
	Número do lote/Código do lote
	Número da peça
	Não estéril
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Não reesterilizar
	Não fabricado com látex de borracha natural
	Consulte as instruções de uso

Viper® é uma marca comercial registrada da Diversatek Healthcare.
Diversatek™ Healthcare é uma marca comercial da Diversatek, Inc.

Detentor da notificação/ Importador: GFE do Brasil LTDA
Rua Buarque de Macedo, 1310
Campinas – SP
Resp. Técnico: Claudio Seo CRF: 52.207
RMS: 10334789007