



Versão 01 - Nov 2024




EzyShoot®

Ligadura Multibanda



R. Buarque de Macedo, 1310
Campinas/SP
☎ +55 19 3213.1355

gfedobrasil.com.br

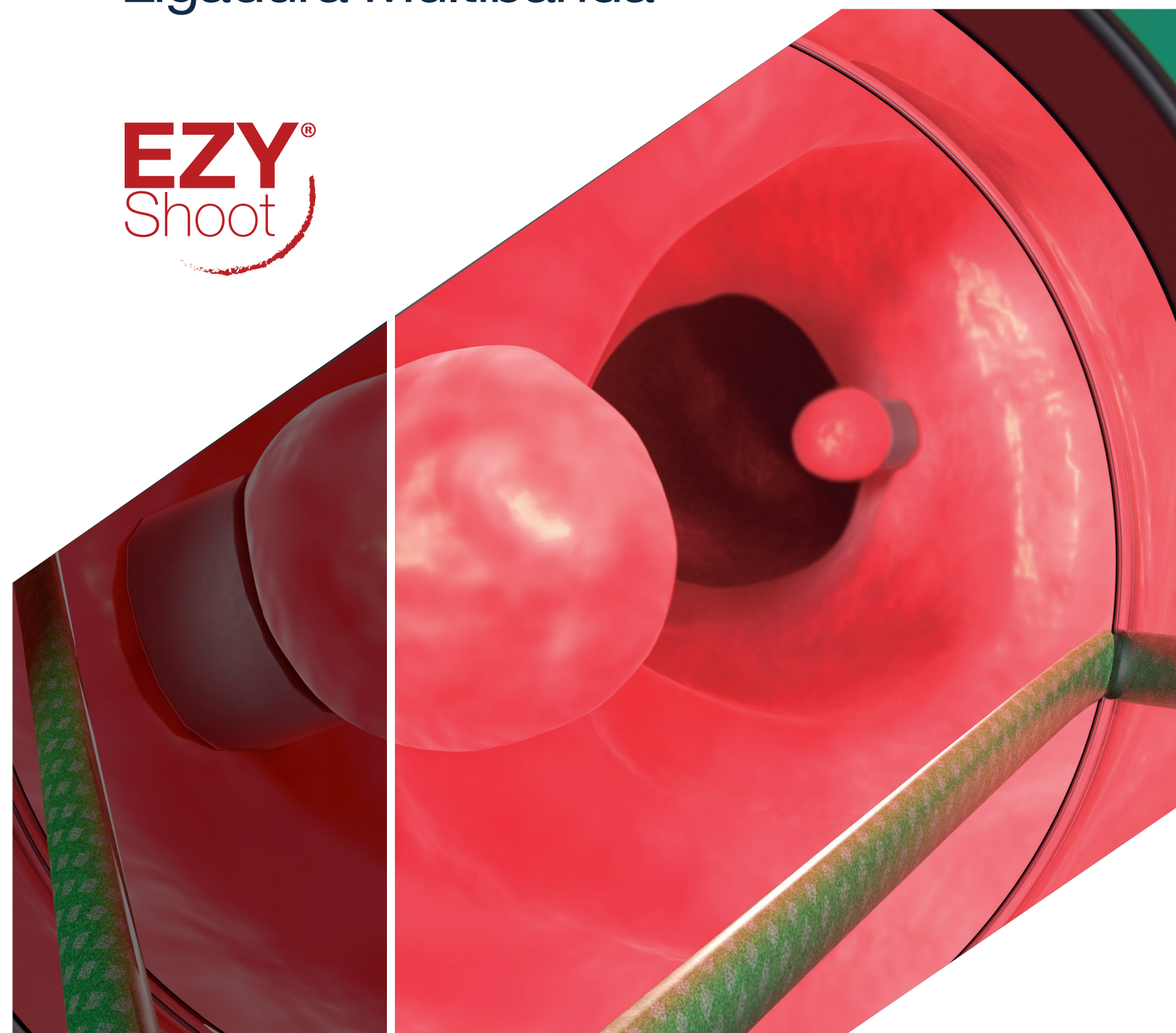

Cateter-guia pré-carregado
para fácil montagem.


gfedobrasil.com.br



EzyShoot®

Ligadura Multibanda

- Cateter-guia pré-carregado para fácil montagem
- Conexão universal luer-lock para limpeza
- Anel de silicone para melhor sucção
- Pode ser montado em todos os endoscópios
- Anel de código de cor verde para identificação rápida da última foto
- Disponível em látex 6, 7, 10

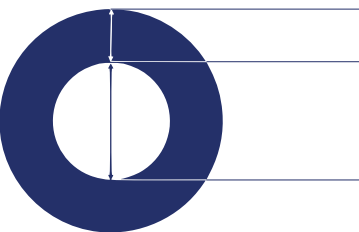

Espessura na posição liberada

Diâmetro interno. em posição liberada

Referência	CATETER		Quantidade (fotos)	ANEL		ENDOSCÓPIO
	Comprimento (cm)	Diâmetro (mm)		Diâmetro interno. in posição liberada (mm)	Espessura liberada posição (mm)	
GF-OVL100	150	2.2	6 latex	1.90	1.75	8.5-11.5
GF-OVL501	150	2.2	7 latex	1.90	1.75	8.5-11.5
GF-OVL510	150	2.2	10 latex	1.90	1.75	8.5-11.5
*GF-OVL100-RU	150	2.2	6 latex	1.90	1.75	8.5-11.5
GF-OVL100-R	Alça reutilizável					

Passo a passo G-Flex® montagem de ligadura multibanda




Passo 1

Insira o catéter guia no canal do endoscópio.




Passo 2

Encaixe a manopla no canal até ficar bem posicionado e fixo no canal do endoscópio.

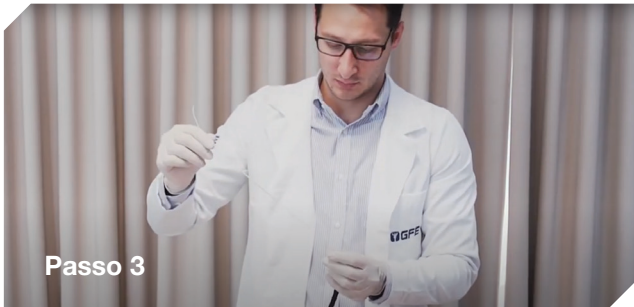

Passo 3

Após a inserção dentro do endoscópio e fixação da manopla, remova o catéter guia.

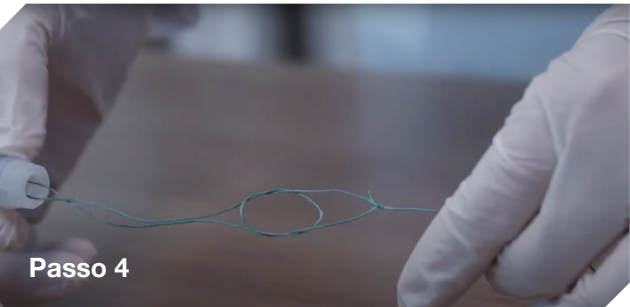

Passo 4

De um nó entre o fio de tração e o cap da ligadura.



Passo 5

Use a manopla interna para ajustar a linha de tração.



Passo 6

Ajuste a linha de tração pela manopla interna até que cap esteja na ponta do canal do endoscópio.



Passo 7

Encaixe o cap na ponta do canal do endoscópio.



Passo 8

Após tudo encaixado, use a manopla externa para disparar a liga.