


1. Uso pretendido

A Escova para Limpeza de Broncoscópico é usada para limpar o canal de trabalho do Broncoscópico. É fornecida não estéril e destina-se exclusivamente a uso único.

2. Descrição do Produto

O produto é constituído de um cateter longo com uma escova em cada extremidade, de tamanhos diferentes.

3. Especificações

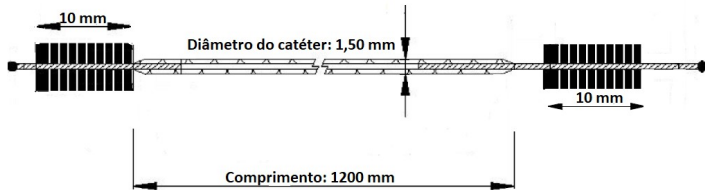

4. Orientações para antes do primeiro uso

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a manipulação e operação do produto. Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso.

Retire o produto da embalagem cuidadosamente e examine-o para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

5. Manuseio e operação

A Escova para Limpeza de Broncoscópico deve ser manuseada através do cateter e passada através de todo o comprimento do canal de trabalho do broncoscópico várias vezes, com a solução descrita nas instruções do fabricante do aparelho.

Atenção: introduzir a escova com cuidado no canal, mantendo sempre o mesmo sentido de introdução. A distância de introdução entre o cateter e o canal não deve ser superior a 2cm para não vincar o cateter.

6. Armazenamento

Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!
Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!

Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!

Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

7. Limpeza e esterilização

Este dispositivo foi concebido e garantido para uso único!

8. Risco em caso de reutilização

Este dispositivo destina-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

9. Usuário

Os usuários dos produtos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas.

10. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde dos funcionários da G-Flex, somente serão aceitos produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

11. Base legal

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.

12. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos produtos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).

	Número do catálogo		Não reutilize
	Lote		Proteja da luz solar
	Fabricante		Mantenha seco
	Data de fabricação		Quantidade por caixa
	Data de validade		Cuidado
	Não utilize se a embalagem estiver danificada		Não estéril

