

USO ÚNICO/ ISENTO DE REGISTRO

## Uso pretendido

A espuma pode ser utilizada para limpar o endoscópio ou para proteção da parte distal do mesmo.

A Espuma de Limpeza e Proteção de Endoscópios é usada para limpeza mecânica da superfície e componentes externos do aparelho endoscópio.

## Descrição do Produto

O produto constitui-se de um cilindro de espuma com uma abertura central, utilizada para encaixar o endoscópio e facilitar o manuseio da espuma ao longo deste. A espuma de limpeza é fornecida não estéril e destina-se exclusivamente a uso único.



## Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do produto. É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a manipulação e operação.

Antes de usar o produto, inspecione o conteúdo da embalagem para conferir se todos os componentes estão presentes, se não há danos/avarias no produto e se está dentro do prazo de validade. Caso sejam observadas quaisquer irregularidades, não usar o produto e entrar em contato com o distribuidor imediatamente.

## Manuseio e operação

### Quando utilizado para a limpeza:

No processo de limpeza do endoscópio, para a eficácia da limpeza, a espuma deve estar umedecida usando produtos indicados pelo fabricante do endoscópio.

### Quando utilizado para a proteção:

Quando a espuma for utilizada para esta finalidade, ela deve estar seca ser utilizada somente para esta finalidade. Caso tenha sido usada para outros fins, descartar a mesma.

## Procedimento

Após o exame, encaixar a espuma na ponta distal do endoscópio de acordo com o tamanho do orifício da espuma, protegendo a mesma no trânsito até a sala de expurgo. Em seguida, usando produtos indicados pelo fabricante do endoscópio, friccionar a espuma na parte externa do equipamento de forma a realizar a remoção mecânica da sujeira. Repetir o processo de fricção até estar seguro de que toda a sujidade foi removida.

**Atenção:** Não utilizar a espuma de limpeza/proteção do endoscópio para a limpeza interna ou dos canais do endoscópio, uma vez que tal procedimento deve ser realizado com dispositivo apropriado.

## Armazenamento

⚠ Não coloque nenhum objeto sobre o produto ou sua embalagem!  
⚠ Não coloque o produto perto de produtos químicos agressivos!

☀ Não exponha o produto à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco, em temperatura ambiente e livre de contaminações.

Não serão aceitas reclamações se o produto tiver sido armazenado de forma inadequada.

É recomendável que sejam realizadas inspeções a intervalos regulares para garantir o uso do produto antes do vencimento do prazo de validade

## Limpeza e esterilização



Este produto foi concebido e garantido para uso único!

## Risco em caso de reutilização

Esses produtos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um produto de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do produto.

## Usuário

Os usuários dos produtos G-FLEX precisam ser especialistas na área de endoscopia.

## Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

## Base legal

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.

## Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

**Horários disponíveis:** Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).



Número do catálogo



Consulte as instruções de uso



Lote



Data de fabricação



Data de Validade



Não utilize se a embalagem estiver danificada



Não estéril



Não reutilize



Proteja da luz solar



Mantenha seco



Quantidade por caixa



Atenção



G-Flex América Latina Ind.Prod.Man.Ltda | Rua Marquês do Herval, 189 – Centro – Espírito Santo do Pinhal/SP  
Telefone: +55 (0) 19. 3661-6831 | E-mail: production@g-flex.com | Website: www.g-flexamerica.com

Formulário Original: IFU-Espuma de Limpeza e Proteção de Endoscópios  
Nome Atual: IFU -Espuma de Limpeza e Proteção de Endoscópios

Data de Aprovação: 05/11/16  
Data de Revisão: 05/11/16

Data de Criação: 04/11/16  
Página: 1 de 1  
Versão: 01