



## 1. Uso pretendido

A Pinça Hot Biopsy descartável é usada para retirar amostras de biópsia (amostras de tecidos) do corpo humano através de endoscópios.

## 2. Descrição do produto

O dispositivo é composto por uma garra, uma mangueira de mola espiral, e com ou sem uma manopla operacional com conector bisturi eletrônico.

## 3. Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo à manipulação e operação.

Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria.

Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.



Se a embalagem apresentar algum dano, a esterilidade do dispositivo não estará garantida.

## 4. Manuseio e Operação



O dispositivo pode ser usado exclusivamente com um endoscópio, um bisturi eletrônico e um cabo ativo.

### 4.1. Introdução no endoscópio

O dispositivo precisa ser passado através do canal de trabalho do endoscópio com sua alça dentro do tubo.

Observe a compatibilidade entre os diâmetros do dispositivo e do canal de trabalho.

### 4.2. Conexão com o cabo ativo do bisturi

Conecte o cabo ativo ao conector elétrico na manopla e ao bisturi eletrônico.

### 4.3. Bisturis eletrônicos

O dispositivo pode ser conectado a todos os bisturis eletrônicos licenciados usando o cabo ativo.

Sempre verifique a compatibilidade entre o bisturi eletrônico e o cabo ativo. Na dúvida, entre em contato com o fabricante do bisturi ou seu distribuidor local.

## 5. Procedimento

- Coloque a Pinça Hot Biopsy perto do tecido a ser retirado do paciente.
- Abra as conchas empurrando o apoio plástico na manopla.
- Coloque a pinça Hot Biopsy no tecido e feche as conchas na pinça puxando de volta o apoio.
- Aplique a corrente elétrica sobre a pinça Hot Biopsy (observe as instruções do fabricante do bisturi eletrônico).
- Retire cuidadosamente a amostra de tecido.
- Interrompa a corrente elétrica do bisturi eletrônico e mantenha as conchas da pinça fechadas.
- Retire a pinça Hot Biopsy completamente para fora do endoscópio com suas conchas fechadas.
- Esta amostra de tecido retirada estará pronta para exame histológico posterior.



Não toque outras áreas de tecido ao usar eletricidade do bisturi eletrônico com as conchas do fórceps (alto risco de lesão para o paciente). Não use o adaptador de enxágue durante o trabalho com alta frequência do bisturi eletrônico, mas apenas durante limpeza.





## 6. Armazenamento

Este dispositivo é fornecido esterilizado e, para mantê-lo assim até seu primeiro uso, ele precisa ser mantido em sua embalagem esterilizada original.



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!

Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

## 7. Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi projetado e é garantido para uso único!

## 8. Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

## 9. Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

## 10. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

## 11. Base legal

Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

## 12. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

**Horários disponíveis:** Segunda a sexta-feira; 9h00 às 17h00 (Europa)





### 13. Símbolos

	Data de fabricação		Não use se a embalagem estiver danificada		Cuidado
	Validade		Proteja da luz solar		Não reutilize
	Código do lote		Mantenha seco		Consulte as Instruções de Uso
	Esterilizado com óxido de etileno		Quantidade por caixa		

