

CORPAK®

M E D S Y S T E M S

CORFLO-cuBBy®

DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE ESTOMA

Para uso com o Dispositivo Gastrotômico CORFLO-cuBBy de Baixo Perfil com
CONTEÚDO NÃO ESTÉRIL:

- 1 ea. Dispositivo de Medição de Estoma
- 1 ea. Seringa de 6 cc com trava Luer

INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se o conteúdo apresenta danos. Caso esteja danificado, não utilize o produto. A profundidade do estoma deve ser determinada para definir o comprimento adequado do eixo.

NOTA: Recomenda-se realizar duas leituras, uma na posição vertical e outra no decúbito dorsal. Calcule a média das duas leituras para obter o comprimento desejado.

1. Lubrifique a ponta do dispositivo de medição com lubrificante solúvel em água.
2. Empurre gentilmente a ponta do dispositivo de medição através do local do estoma até o estômago.
3. Use a seringa com trava Luer fornecida para insuflar o balão com 5cc de ar.

4. Gire a torneira em 90 graus para reter o ar no balão.
5. Coloque gentilmente a tração no dispositivo de medição até sentir resistência contra a parede do estômago.
6. Registre a marcação adequada em centímetros.
7. As medições são realizadas em incrementos de 0,5 cm: cada centímetro é marcado com um número (consulte a Figura 1).

NOTA: É importante selecionar o comprimento apropriado para a espessura da parede abdominal. Se a medição aparentar estar entre dois tamanhos, selecione o tamanho maior.

WARNING: Subdimensionar o CORFLO-cuBBy® pode causar a incorporação com erosão da parede gástrica, necrose do tecido, infecção, sepse e sequelas associadas.

8. Esvazie o balão e remova o dispositivo de medição.

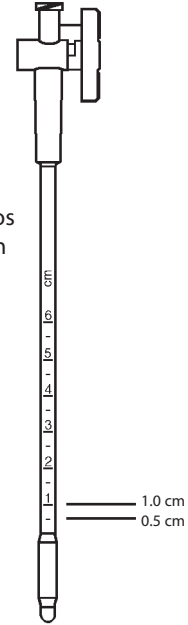


FIGURA 1
CORFLO-cuBBy
Dispositivo de Medição
de Estoma

CORPAK MedSystems, Inc., Buffalo Grove, IL 60089
1-800-323-6305 • 1-847-403-3400 • FAX 1-847-541-9526

CE 0344
4860E 10-11