



1. Uso pretendido

Pinças de Corpo Estranho são destinadas a retirar corpos estranhos do corpo humano através de endoscópios.

2. Descrição do produto

As Pinças de Corpo Estranho são feitas de um tubo flexível com uma garra distal e com ou sem uma manopla proximal.

3. Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo à manipulação e operação.

Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.



Considerando que o dispositivo não é fornecido esterilizado, o usuário precisa fazer isso antes do primeiro uso (Veja Limpeza e Esterilização)

4. Manuseio e operação

O dispositivo pode ser inserido através do canal de trabalho do endoscópio com suas garras retiradas dentro do tubo. Observe a compatibilidade entre diâmetros das Pinças de Corpo Estranho e do canal de trabalho do endoscópio.



Antes de inserir o modelo de dispositivo sem manopla no canal de trabalho, monte a manopla universal. Durante a montagem da manopla, as conchas do dispositivo devem estar fechadas.

5. Procedimento

Depois que o corpo estranho for localizado no corpo do paciente, deve-se seguir o procedimento abaixo:

- Introduza o dispositivo no endoscópio.
- Coloque a extremidade distal do tubo em frente ao objeto a ser removido.
- Empurre o apoio da manopla para externalizar a extremidade em garra e depois traga o objeto a ser capturado no centro das garras.
- Feche as extremidades cuidadosamente, tanto quanto o objeto permitir, puxando de volta o apoio da manopla.
- Retire o objeto e as garras suavemente, retirando o endoscópio. Mantenha as garras da pinça grasper sempre firmemente fechadas

6. Armazenamento

Observe sempre um diâmetro mínimo de 20 cm para enrolar o instrumento. Sempre comece a enrolar os dispositivos da extremidade distal para a proximal, para evitar danos.



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!
Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!





Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

7. Limpeza e esterilização

A G-Flex recomenda seguir uma das sequências abaixo para esterilizar o dispositivo:

- Limpeza manual, limpeza por ultrassom, limpeza automática/térmica e autoclavagem; ou
- Limpeza manual, limpeza por ultrassom, e esterilização com gás óxido de etileno



Esterilize com autoclavagem ou com óxido de etileno Não há necessidade de fazer ambos.

7.1. Limpeza manual

A limpeza do dispositivo deve ser feita imediatamente após cada uso:

- Mergulhe o dispositivo em detergente líquido ou desinfetante adequado (sempre observe o diâmetro mínimo de 20 cm ao enrolar o instrumento e a adequação do produto de limpeza!).
- Enxugue o instrumento com uma toalha macia.

7.2. Limpeza por ultrassom

A limpeza por ultrassom facilita desalojar os materiais residuais e deve ser feita antes da esterilização. A limpeza por ultrassom precisa durar pelo menos 30 minutos.

- Limpe o dispositivo após o uso.
- Coloque o instrumento em um tanque de limpeza ultrassônica sempre observando do diâmetro mínimo de 20 cm para enrolar (observe as instruções do fabricante do equipamento ultrassônico!).
- Use apenas água da torneira e detergentes que dissolvem albumina, sempre de acordo com as instruções do fabricante do equipamento ultrassônico.
- Enxágue o instrumento com água de torneira e enxugue usando compressas de gaze.

7.3. Limpeza automática / térmica

Alternativamente, ou além da limpeza manual, este instrumento pode ser limpo em máquinas de limpeza automática/térmica usando detergentes alcalinos aprovados. Consulte instruções relevantes do fornecedor da máquina de limpeza.

7.4. Esterilização

7.4.1. Autoclave



Antes da esterilização por autoclave, o instrumento deve ser cuidadosamente limpo conforme descrito no Manual de Limpeza, Limpeza Ultrassônica e Limpeza Automática/Térmica.



Este símbolo significa que o produto pode ser esterilizado em autoclave de acordo com os parâmetros apresentados.

Parâmetros:

Temperatura:	134°C
Pressão:	3 bar
Exposição:	≥ 18 min

Também neste caso, o diâmetro mínimo de 20 cm para enrolar o instrumento precisa ser observado.



As embalagens originais da G-FLEX não são autoclaváveis!





7.4.2. Esterilização com gás óxido de etileno



Siga os avisos do fabricante em relação a indicadores biológicos.

Parâmetros:

Temperatura:	57 °C
Pressão:	1,7 bar
Exposição:	máx. 4 h
Umidade relativa:	50 %
Concentração do gás:	12 %
Tempo de Aeração:	7 dias em temperatura ambiente ou 12 horas em 50 a 57°C

1. Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

2. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

3. Base legal






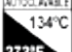




Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

4. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira; 9h00 às 17h00 (Europa)

5. Símbolos

	Data de fabricação		Consulte as instruções de Uso		Cuidado
	Validade		Proteja da luz solar		Autoclavável a 134°C/ 273°F
	Código do lote		Mantenha seco		Quantidade por caixa
	Não estéril				

