



0120



1. Uso pretendido

Pinças de Corpo Estranho são destinadas a retirar corpos estranhos do corpo humano através de endoscópios.

2. Descrição do produto

As Pinças de Corpo Estranho são feitas de um tubo flexível com uma garra distal controlada por uma manopla proximal.

3. Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo à manipulação e operação.

Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.



Se a embalagem apresentar algum dano, a esterilidade do dispositivo não estará garantida.

4. Manuseio e operação

A Pinça de Corpo Estranho pode ser inserida através do canal de trabalho do endoscópio com suas garras retiradas dentro do tubo. Observe a compatibilidade entre diâmetros das Pinças de Corpo Estranho e do canal de trabalho do endoscópio.

Pinças de Corpo Estranho são indicadas para suspeita de gastrite, diagnóstico (manchas coloridas, problema na mucosa, protuberância no tecido) e diarreia crônica.

5. Procedimento

- Depois que o corpo estranho for localizado no corpo do paciente, deve-se seguir o procedimento abaixo:
- Introduza o dispositivo no endoscópio.
- Coloque a extremidade distal do tubo em frente ao objeto a ser removido.
- Empurre o apoio da manopla para externalizar a extremidade em garra e depois traga o objeto a ser capturado no centro das garras.
- Feche as extremidades cuidadosamente, tanto quanto o objeto permitir, puxando de volta o apoio da manopla.
- Retire o objeto e as garras suavemente, retirando o endoscópio. Mantenha as garras da pinça grasper sempre firmemente fechadas

6. Contraindicação

- Sangramentos
- Amostras de tecidos remanescente de úlceras vasculares
- Preparação (intestinal) inadequada do paciente
- Geral. EGD, colonoscopia, proctoscopia, sigmoidoscopia

7. Possíveis complicações

- Perfuração, hemorragia, infecção, sepse, reação alérgica a medicamentos, hipotensão, depressão respiratória ou parada respiratória, arritmia ou parada cardíaca.





0120



8. Armazenamento

Este dispositivo é fornecido esterilizado e, para mantê-lo assim até seu primeiro uso, ele precisa ser mantido em sua embalagem esterilizada original.



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!

Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

9. Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi projetado e é garantido para uso único!

10. Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário ou do paciente devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

11. Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

12. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

13. Base legal

Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

14. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira; 9h00 às 17h00 (Europa)





15. Símbolos



Data de fabricação



Não use se a embalagem
estiver danificada



Cuidado



Validade



Proteja da luz solar



Não reutilize



Código do lote



Mantenha seco



Consulte as Instruções
de Uso



Esterilizado com óxido
de etileno



Quantidade por caixa

