



0120



1. Uso pretendido

Drenos naso-biliares destinam-se ao desvio extracorpóreo dos ductos biliar e pancreático. Promovem uma drenagem efetiva e, portanto, reduzem o risco de colangite. São usados principalmente como preparação pré-operatória.

2. Descrição do produto

O dispositivo é feito de um dreno naso-biliar radiopaco, um cateter nasal, um tubo de conexão de drenagem e um adaptador Luer-Lock.

3. Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo à manipulação e operação.

Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

4. Manuseio e operação

A inserção do dispositivo é feita através do canal de trabalho de um duodenoscópio. O uso de fio guia (não incluso) é necessário durante a inserção.

5. Procedimento

- Coloque a extremidade distal do duodenoscópio em frente à papila.
- Passe o fio guia através do canal de trabalho do duodenoscópio para dentro do ducto biliar e para cima até o ducto hepático comum.
- Deslize o dreno naso-biliar sobre o fio guia com sua ponta distal retificada.
- Coloque o dreno naso-biliar dentro do ducto hepático comum (sob controle fluoroscópico).
- Remova cuidadosamente o duodenoscópio e certifique-se de que a Sonda de Drenagem Naso-biliar tenha ficado no lugar (sob controle fluoroscópico).
- Retire suavemente o fio guia da sonda.
- Introduza o Cateter Nasal pela narina do paciente e direcione para a faringe.
- Prenda a extremidade do Cateter Nasal com uma pinça e retire através da boca do paciente.
- A extremidade proximal da Sonda de Drenagem Biliar, que está saindo pela boca do paciente, é levada para fora do nariz através do Cateter Nasal.
- Remova o Cateter Nasal.
- Conecte o adaptador Luer-Lock incluso à extremidade proximal do Dreno Naso-biliar.
- Prenda a extremidade da Sonda de Drenagem no queixo do paciente e na testa, aplicando uma fita adesiva.
- A sonda pode agora ser conectada a um receptáculo (usando o tubo de conexão de drenagem).





0120



6. Armazenamento

Este dispositivo é fornecido esterilizado e, para mantê-lo assim até seu primeiro uso, ele precisa ser mantido em sua embalagem esterilizada original.



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!
Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

7. Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi projetado e é garantido para uso único!

8. Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário ou do paciente devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

9. Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.

10. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

11. Base legal

Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

12. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira; 9h00 às 17h00 (Europa)














0120



STERILE EO

13. Símbolos

	Data de fabricação		Não use se a embalagem estiver danificada		Cuidado
	Validade		Proteja da luz solar		Não reutilize
	Código do lote		Mantenha seco		Consulte as Instruções de Uso
	Esterilizado com óxido de etileno		Quantidade por caixa		

