



### 1. Uso pretendido

O bocal é usado para evitar que o tubo de inserção do endoscópio e dilatadores esofágicos sejam mordidos pelo paciente.

### 2. Descrição do produto

O instrumento é constituído por uma peça plástica a ser colocada na boca e uma tira a ser fixada em torno do pescoço do paciente.

### 3. Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do dispositivo.

É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo ao manuseio e operação.

Retire o instrumento da embalagem cuidadosamente e examine o instrumento para verificar se existe alguma avaria. Se notar avarias ou falta de algum item, entre em contato com seu distribuidor imediatamente.

### 4. Manuseio e operação

Evite colocar os dedos entre o bocal e os dentes do paciente quando colocar o bocal na boca do paciente.

### 5. Procedimento

Separe um dos lados da tira do bocal antes de colocar o bocal na boca do paciente.

Coloque o bocal na boca do paciente.

Coloque a tira em torno do pescoço do paciente e prenda de novo no bocal.

### 6. Armazenamento



Não coloque nenhum objeto sobre o instrumento ou sua embalagem!

Não coloque os instrumentos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

### 7. Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi projetado e é garantido para uso único!

### 8. Risco em caso de reutilização

Esses dispositivos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um dispositivo de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário ou do paciente devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do dispositivo.

### 9. Usuário

Os usuários dos instrumentos G-FLEX precisam ser especialistas em suas áreas. É obrigatório um treinamento adequado e específico para preparação, cuidado e manutenção dos instrumentos flexíveis.





### 10. Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos instrumentos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os instrumentos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

### 11. Base legal

Aplicar-se-á a legislação da União Europeia.

### 12. Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativos aos nossos instrumentos, entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

#### Horários disponíveis:

Segunda a sexta-feira; 9h00 às 17h00 (Europa)

### 13. Símbolos



Data de fabricação



Proteja da luz solar



Cuidado



Validade



Mantenha seco



Consulte as Instruções de Uso



Não estéril



Não reutilize



Quantidade por caixa



Código do lote

